

Saver One P[®]

DEA con Monitoreo de ECG
más Desfibrilación Manual

un desfibrilador sólido, pequeño y ligero
para transportarlo y usarlo en cualquier lugar



5
YEARS
warranty

CE
0051

IMQ mark for
Safety & Quality

CSQ
MED

AED
series

Gran Pantalla Detallada
Monitorización Cardíaca Básica
Desfibrilación Manual y Cardioversión
Mayor Portabilidad

 **REIMEDICAL, S.L.**
www.reimedical.com

funcionalidad deseada

Altamente flexible y versátil con capacidades avanzadas

Sólido, pequeño y ligero (<2 kg) con cómoda asa de transporte

Proporciona funciones avanzadas para usuarios de SVB y SVA, como monitoreo de ECG y desfibrilación manual o cardioversión eléctrica (desfibrilación sincrónica)

SVB Pediátrico Avanzado

Dos versiones de energía:
- Estándar con máximo 200 Joules
- Potencia con máximo 360 Joules

Protocolos de choque para adultos personalizables

Autotest automático diario con indicadores de estado

Opciones de baterías de larga duración para la mejor portabilidad

Menú para cambiar configuración

Capaz para adultos (>8 años o >25 kg) y los niños (1÷8 años o <25 kg)

Electrodos desechables multifunción con 30 meses de vida útil

Configuración Pronto para Imprimir (si opción comprada) para imprimir los archivos del ECG en una impresora térmica a través del puerto IrDA

Diversas configuraciones en opción

Actualizado a las directrices AHA/ERC

5 Años de Garantía



C/ Hnos. Lumier, 21
28500 La Poveda, Arganda del Rey
MADRID, ESPAÑA
Telf.: 91 870 64 77 / 91 870 64 88
Fax: 91 870 64 97
Email: info@reimedical.com



Sencillo para elegir el modo de funcionamiento más adecuado a sus decisiones: empieza como DEA, de confianza por usuarios con conocimientos del Soporte Vital Básico, para fácilmente convertirlo en modo MANUAL por usuarios del Soporte Vital Avanzado, prácticos en gestionar el nivel de energía, cuando descargar o bien seleccionar una desfibrilación sincrónica.

Una pantalla digital de alta resolución permite al usuario de visualizar el ECG del paciente durante el uso tanto con electrodos y con el cable de ECG reutilizable a 2 o 3 derivaciones.

Libre de Mantenimiento

Realiza auto-chequeo diario y mensual y semestral de los circuitos internos, la forma de onda, el sistema de descarga, las calibraciones y la capacidad de la batería. Además del autotest activado por el usuario cuando se conecta la batería y cuando se enciende. Indicadores visibles de estado muestran si el dispositivo y su batería están listos para el uso.

RCP Dirigida

Voz y texto y los gráficos de barras para ayudar a los socorristas durante la RCP, con instrucciones y señales de audio con un metrónomo para el número apropiado y la frecuencia de las compresiones torácicas (opción se puede deshabilitar en manual).

SVB Pediátrico Avanzado

El primer desfibrilador diseñado para socorristas que tienen el deber de responder y que durante un Soporte Vital Básico Pediátrico deben usar una proporción de 15:2 de CV (requerido por AHA/ERC).

Menú de Configuración

Posibilidad de configurar el dispositivo a través del menú para cambiar la fecha o la hora local, adaptar el volumen o el contraste de la pantalla, seleccionar un idioma diferente, excluir la guía a la RCP y/o el micrófono para las grabaciones; imprimir archivos de ECG y/o simplemente obtener información sobre el dispositivo y la batería.

Desfibrilador

Onda: B.T.E. (Bifásica Exponencial Truncada) adaptativa

Tipo de Energía: Escalada de 50J hasta 360J

DEA Energía: fija 50J Pediátrico

150, 200, 200J Adultos Estándar (protocolo preconfigurado)

200, 250, 360J Adultos Potencia (protocolo preconfigurado)

Manual Energía: seleccionada por el usuario de 50 a 360J

Detalle Energía: pantalla reporta nivel de energía a descargar tanto en el modo Manual que en modalidad DEA

DEA Función: Semi-Automático. Análisis del ritmo y cargarse y descargar con el nivel preconfigurado de energía

Manual Función: Descarga manual, cardioversión, monitoreo ECG

Tiempo de carga: Menos que 9 segundos con una batería nueva y cargada. Batería baja tendrá un tiempo más largo

Algoritmos: Detector inteligente de arritmias, evalúa el ritmo y analiza la impedancia torácica del paciente y determina si se necesita una descarga

Ritmos Descargables: Fibrilación Ventricular (FV) y compleja Taquicardia Ventricular (TV) o Supraventricular (TSVP)

Tiempo Análisis: EN 60601, de 4 a 15 segundos

Impedancia: de 20 a 200 ohms

Sensibilidad: EN 60602-2-4 (fuente AHADB, MITDB), 97%

Especificidad: EN 60602-2-4 (fuente AHADB, MITDB), 99%

Controles: Encendido/Apagado, botones del menú, botones para elegir el nivel de energía, para cargar y para el choque

Monitoreo de ECG

Conexión Paciente: Electrodos de desfibrilación o electrodos de ECG con cable de monitorización reutilizable 2 o 3-Lead

Tamaño ECG: automático de ganancia controlada por pantalla

Frecuencia Cardíaca: de 30 a 300 bpm

Pantalla

Tipo: 5.7" Alta resolución (480x320) retroiluminación LED

Tamaño: 12 x 8 cm

Velocidad Barrido: 25 mm/sec

Informaciones: El modo en uso, energía a entregar, FC e impedancia, forma de onda ECG, mensajes de texto, gráfico de barras de carga y de RCP, indicador de batería, tiempo del tratamiento transcurrido, número de fibrilaciones y de choques, hora y fecha local, mensajes de error del dispositivo

Grabación de Datos


Tipo: Tarjeta de memoria opcional (xD Card or SMC) de 1GB y 64MB de memoria interna para el subsistema

Capacidad: con micrófono activado 40 horas de ECG, eventos y voces operadores o 382 horas solamente de ECG sin la grabación de audio

Registros: fichas "AEDFILES" con evento registrado completo y "AED1LOG" archivador detallado de la actividad diaria de auto-chequeo del dispositivo

Reporte de Eventos: PC software "Saver View Express"

Comunicación: Puerto de infrarrojos IrDA (opcional) que transmite los datos de ECG a impresora térmica externa

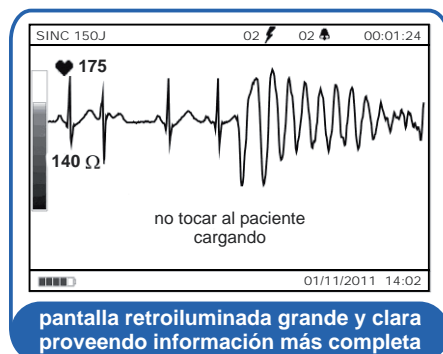

Opciones de Batería

Tipo: Li-Ion acumuladores (recargable)

Tiempo de Carga: 2,5 horas con el SAV-C0014 (estación de carga completa) a temperatura 20° C

Autonomía: Con una batería nueva y cargada a 20° C 400 choques o 15 horas de monitorización ECG

Vida Útil: 2,5 años o 300 ciclos de carga a 20° C

Tipo: LiMnO2 desechable

Autonomía: Con una batería nueva y cargada a 20° C 250 choques o 15 horas de monitorización ECG

Vida en Espera: 4 años a temperatura 20° C

Estructura

Tamaño: 26,5 x 21,5 x 7,5 cm

Peso: 1,95 kg con una batería desechable; 2,10 kg con una batería recargable

Caja Externa: ABS grado médico

Ambiental

Temperatura: En funcionamiento/espera: 0°-55° C; almacenar/transporte (sin baterías): -35°-60° C

Humedad Relativa: 0-95% (no condensación)

Grado de Protección Polvo y Agua: IEC 60529, IP54

Descargas Electroestáticas: EN 61000-4-2

Interferencia Electromagnética, Radiación: EN 60601-1-2

Interferencia Electromagnética, Protección: EN 60601-1-2

Compatibilidad Electromagnética: CISPR 11, Clase B emisiones votados y conducidas

Resistencia Mecánica: EN 60601-1, cláusula 21 (caída de 1 metro, impacto, fuerza, manipulación, tolerancia móvil)

Seguridad del Paciente: Todas las conexiones al paciente están completamente aislados eléctricamente

Directiva 93/42/EEC: Clase IIb

Modelo y Opciones de Configuración

Códigos: SVP-B0006 por la Versión Estándar a 200J o SVP-B0007 por la Versión Potencia a 360J

Conf-Norm: Configuración Basica (batería desechable, par de electrodos adultos, maletín)

Conf-Rech: Configuración Recargable (acumuladores, estación de carga, par de electrodos adultos, maletín)

Conf-Print: Configuración Pronto para Imprimir (puerto IrDA, impresora térmica, batería desechable, par de electrodos adultos, maletín)

Conf-Rech/Print: Configuración Recargable y Pronto para Imprimir (puerto IrDA, impresora térmica, acumulador, estación de carga, par de electrodos adultos, maletín)